

CALE DE POSITIONNEMENT - BOTE / ÉTRIER
Cale de positionnement en gel amorphe polyuréthane



Description du produit :

Elles sont conçues pour protéger la partie inférieure de la jambe et le talon du patient dans les étriers universels. Ces coussinets doivent être utilisés lorsque le patient est en position de lithotomie pour les procédures gynécologiques et urologiques, ainsi que pour les cas du côlon/rectum.

Matériaux

Elles sont composées d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales de positionnement en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les positionneurs de gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre 50° et -18°.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des cales conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets.

Conditionnement

2 pièces.

Taille cales positionnement en gel 1: 23 x 28 x 1,3 cm, Choisissez une option

Référence : -